

Guía de referencia rápida

Encendido del sistema

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior del sistema.

Iniciar un estudio

Nuevo paciente

- 1 Pulse Entrar Información del paciente en la pantalla de inicio o + Nuevo paciente en el panel táctil.
- 2 Introduzca información sobre el paciente.
- 3 Pulse Explorar para comenzar la exploración.

Todos los datos que se guarden durante el estudio se vinculan al paciente.

Tipos de examen

- 1 Seleccione el botón de transductor y de examen.
- 2 Seleccione el tipo de transductor y de examen.
- 3 Pulse Explorar para comenzar la exploración.

Exploración

- 2D es el modo predeterminado. Pulse 2D para volver al modo predeterminado.


- Pulse M para explorar en el modo M.
- Pulse C para explorar en Doppler en color
- Pulse D para explorar en Doppler.

Modo M

- 1 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea M en la imagen 2D.
- 2 Para visualizar tanto la línea M como el trazo, pulse ↻ (Actualizar) o pulse M de nuevo.
- 3 Pulse el botón ↻ (Actualizar) para alternar el control entre la imagen y el trazo.


Doppler en color

- 1 Emplee el control Tipo de color del panel táctil para alternar entre la velocidad del color (CVD) y la intensidad del color (CPD), o entre la CVD y la variación del color (Var), en función del tipo de examen. Es posible que tenga que pulsar + Más controles para encontrar el control.

- 2 Arrastre el dedo por la almohadilla táctil para situar el cuadro de color.
- 3 Pulse  (Seleccionar) para controlar el tamaño del cuadro de color y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.

Doppler

- 1 Emplee el control del Modo Doppler del panel táctil para alternar entre la exploración Doppler TDI, PW y CW (las opciones CW y TDI están disponibles solamente para el examen cardíaco). Es posible que tenga que pulsar + Más controles para encontrar el control.
- 2 Utilice la almohadilla táctil para situar la línea D y la ventana en la imagen 2D.
- 3 Para visualizar el trazo espectral, pulse ↻ (Actualizar) o pulse D de nuevo.
- 4 Pulse el botón ↻ (Actualizar) para alternar el control entre la imagen y el trazo.

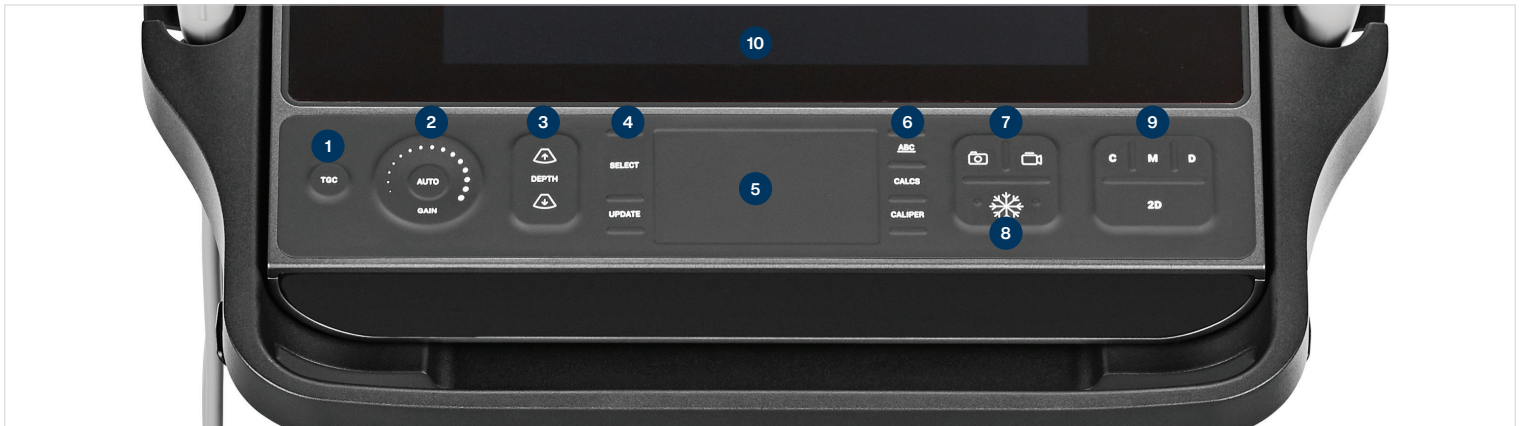

Leyenda:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Compensación de ganancia de tiempo | 7 Botones de guardado |
| 2 Ganancia | 8 Congelación |
| 3 Profundidad | 9 Modos |
| 4 Seleccionar y Actualizar | 10 Panel táctil con controles táctiles |
| 5 Almohadilla táctil | 11 Puertos USB |
| 6 Etiquetas, cálculos y calibradores | 12 Botón de encendido/apagado |

Guía de referencia rápida

Ganancia



Ajuste la ganancia mediante una de las siguientes acciones:

- Arrastre el dedo por la rueda de ganancia.
- Pulse TGC (Compensación de ganancia de tiempo) y ajuste los controles deslizantes en el panel táctil.
- Pulse AUTO para ajustar de forma automática la ganancia.

Profundidad

- Pulse los botones de profundidad  y .

Congelación, descongelación y modo Cine


- 1 Pulse el botón . La pantalla CINE aparece en la esquina inferior izquierda del monitor.
- 2 Para desplazarse a través de los fotogramas del modo Cine, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre el dedo por la almohadilla táctil en sentido horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse el lado derecho o izquierdo de la almohadilla táctil.
 - Deslice el dedo por la rueda de ganancia hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás a través de los fotogramas. Para moverse por los fotogramas de uno en uno, pulse con firmeza el lado derecho o izquierdo de la rueda.
- 3 Para descongelar, pulse el botón  de nuevo.

Zoom

Zoom en directo

- 1 Pulse Zoom en el panel táctil.
- 2 Arrastre el dedo por la almohadilla táctil

para situar el cuadro de zoom.



- 3 Pulse  (Seleccionar) para controlar el tamaño del cuadro de zoom y, a continuación, arrastre el dedo por la almohadilla táctil para ajustar el tamaño.
- 4 Pulse el control de nuevo para utilizar el zoom.

Zoom congelado



- 1 Pulse Zoom en el panel táctil.
- 2 Pulse arriba o abajo en el control para ajustar el aumento.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para mover la imagen.

Mediciones y cálculos

Mediciones

- 1 En una imagen en directo o congelada, image, pulse el botón  (Calibrador).
- 2 Utilice la almohadilla táctil para situar los calibradores predeterminados o seleccione una medición diferente en el panel táctil.
- 3 Pulse  (Seleccionar) to para alternar entre los calibradores.



Cálculos

- 1 En una imagen en directo o congelada, pulse el botón  (CALCS) para visualizar el menú de paquetes de análisis.
- 2 Utilice el panel táctil para seleccionar una medición.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar el calibrador.
- 4 Pulse  to para alternar entre los calibradores.

Etiquetas

- 1 Pulse el botón **ABC** para visualizar la página de etiquetado.
- 2 Pulse Texto, Picto, o Flecha para añadir texto, pictogramas o flechas en la imagen.
- 3 Utilice la almohadilla táctil para situar la etiqueta.


Guardar y revisar

- Pulse el botón  para guardar una imagen y las mediciones y cálculos actuales. Los cálculos y las mediciones asociadas también se guardan en el informe del paciente.
- Pulse el botón  para guardar un clip.
- Pulse sobre las imágenes en miniatura para acceder a la pantalla de revisión o pulse Lista pac. para ver otro estudio. (Puede encontrar esta opción en el panel táctil principal, en la parte inferior del formulario del paciente o del informe, o desde el menú.)

Finalizar y exportar

- 1 Pulse FIN ESTU para finalizar el estudio. Los estudios que están abiertos no se pueden exportar.
- 2 Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en un puerto USB del sistema o soporte.
- 3 Pulse Lista pac. Seleccione un estudio o varios estudios para exportar.
- 4 Pulse Enviar a y luego pulse USB.
- 5 Seleccione la unidad USB en la lista y elija si va a incluir información del paciente.
- 6 Pulse Exportar.

Ayuda y aprendizaje

- Pulse  para acceder a la ayuda integrada y a la guía de usuario del sistema.
- Acceda a la función Aprend para obtener videos de formación y de procedimientos.

Información de contacto

Teléfono (EE. UU. o Canadá): +1-877-657-8118
 Teléfono (fuera de EE. UU. o Canadá): +1-425-951-1330 o póngase en contacto con su representante local
 Correo electrónico: ffss-service@fujifilm.com

P27917-01



FUJIFILM SONOSITE
 Value from Innovation

Cualquier paciente. Cualquier lugar. Cualquier momento.

FUJIFILM Sonosite, Inc.
 Oficina central mundial
 21919 30th Drive SE, Bothell, WA 98021-3904
 Tel: +1 (425) 951 1200 or +1 (877) 657 8050
 Fax: +1 (425) 951 6800
www.sonosite.com

Oficinas de Sonosite en todo el mundo
 FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Australia 1300 663 516
 FUJIFILM Sonosite Australasia Pty Ltd: Nueva Zelanda 0800 888 204
 FUJIFILM Sonosite Brasil +55 11 5574 7747
 FUJIFILM Sonosite Canadá Inc. +1 888 554 5502
 FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd +86 21 5010 6000
 FUJIFILM Sonosite GmbH-Alemania +49 69 80 88 40 30

FUJIFILM Sonosite, Inc.-Estados Unidos +1 425 951 1200
 FUJIFILM Sonosite India Pvt Ltd +91 124 288 1100
 FUJIFILM Sonosite Ibérica SL-España +34 91 123 84 51
 FUJIFILM Medical Co., Ltd.-Japón +81 3 0418 7190
 FUJIFILM Sonosite Korea Ltd +65 6380 5589
 FUJIFILM Sonosite Ltd-Reino Unido +44 1462 341 151
 FUJIFILM Sonosite SARL-Francia +33 182 880 702

SONOSITE y el logotipo de SONOSITE son marcas comerciales y marcas registradas de FUJIFILM Sonosite, Inc., en diversas jurisdicciones. FUJIFILM es una marca comercial registrada de FUJIFILM Corporation. Value from Innovation es una marca comercial de FUJIFILM Holdings America Corporation

Copyright © 2020 FUJIFILM Sonosite, Inc. Reservados todos los derechos.

06/2020