

バーコードリーダー・

インストール手順説明書

SONOSITE は複数の法域において FUJIFILM SonoSite, Inc.の登録商標です。FUJIFILM は FUJIFILM Corporation の登録商標です。Value from Innovation は、FUJIFILM Holdings America Corporation の商標です。その他の商標は全て、それぞれ所有権を有する各社に帰属します。

特許： www.sonosite.com/patents



P28460-02

Published Sep 6, 2023

Copyright © 2023 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

超音波画像診断装置に JADAK バーコードリーダーをインストールする手順

超音波画像診断装置 Sonosite PX シリーズおよび超音波画像診断装置 Sonosite ST シリーズは、予め設定された JADAK JDK-10175 USB バーコードリーダーに対応するよう設計されています。JADAK Flexpoint HS-1M モデルは使用しないでください。安全性および洗浄の手順については超音波画像診断装置のユーザーガイドを参照してください。

1. バーコードリーダーを本体の USB ポートに接続します。
USB ポートの位置が不明な場合は、超音波画像診断装置のユーザーガイドを参照してください。
2. 本体の電源をオンにします。
接続したバーコードリーダーは本体の USB 設定ページに表示されます。
3. バーコードリーダーが正しく動作していることを確認するには、装置上で患者情報フォームを開き、テキストフィールドを選択した後、患者のバーコードをスキャンして、適切なフィールドに正しい情報が入力されていることを確認します。(詳細については、システムのユーザーガイドを参照してください)。

サポート

- FUJIFILM Sonosite テクニカルサポート

アメリカ合衆国およびカナダ	+1 877-657-8118
その他の地域	+1 425-951-1330 にお電話ください。または最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
ファックス	+1 425-951-6700
E メール	ffss-service@fujifilm.com
(アジア)	ffss-apacme-service@fujifilm.com
ウェブページ	www.sonosite.com
富士フイルムメディカル株式会社	
電話：(日本国内)	03-6419-8050
ファックス：(日本国内)	03-6418-6596

FUJIFILM

SONOSITE

選任製造販売業者:

富士フイルムメディカル株式会社

〒106-003 東京都港区西麻布 2-26-30

TEL: 03 (6419) 8050

外国指定管理医療機器製造等事業者:

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

P28460-02

