

# バーコードリーダー

---

インストール手順説明書

SONOSITE は複数の法域において FUJIFILM Sonosite, Inc.の登録商標です。FUJIFILM および FUJIFILM VALUE FROM INNOVATION は複数の法域において FUJIFILM Corporation の登録商標です。その他の商標は全て、それぞれ所有権を有する各社に帰属します。



P28460-03

Published Sep 9, 2024

Copyright © 2024 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

# 超音波画像診断装置に JADAK バーコードリーダーをインストールする手順

本書は JADAK バーコードリーダーを超音波画像診断装置 FUJIFILM Sonosite シリーズに接続して使用する場合に利用可能なカスタムプログラミング機能について補足説明します。

バーコードリーダー製造元が提供する情報については、JADAK 社が発行するバーコードリーダーのユーザーガイドを参照してください。

1. バーコードリーダーを本体の USB ポートに接続します。  
USB ポートの位置が不明な場合は、超音波画像診断装置のユーザーガイドを参照してください。
2. 本体の電源をオンにします。  
接続したバーコードリーダーは本体の USB 設定ページに表示されます。
3. バーコードリーダーが正しく動作していることを確認するには、装置上で患者情報フォームを開き、テキストフィールドを選択した後、患者のバーコードをスキャンして、適切なフィールドに正しい情報が入力されていることを確認します。(詳細については、システムのユーザーガイドを参照してください)。

## サポート

アメリカ合衆国およびカナダ	+1 877-657-8118
その他の地域	+1 425-951-1330 にお電話ください。または最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
ファックス	+1 425-951-6700
E メール (アジア)	ffss-service@fujifilm.com ffss-apacme-service@fujifilm.com
ウェブページ	www.sonosite.com
富士フイルムメディカル株式会社	
電話：(日本国内)	03-6419-8050
ファックス：(日本国内)	03-6418-6596

# FUJIFILM

# SONOSITE

選任製造販売業者:

富士フイルムメディカル株式会社

〒106-003 東京都港区西麻布 2-26-30

TEL: 03 (6419) 8050

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

P28460-03

