
SonoSite 超音波画像診断装置を使用した DICOM データの送受信

ユーザガイド誤記訂正説明書

FUJIFILM は FUJIFILM Corporation の登録商標です。「Value from Innovation」は、FUJIFILM Holdings America Corporation の商標です。Edge、M-Turbo、NanoMaxx、S Series、M シリーズ、S シリーズ、SonoSite および SonoSite ロゴは多数の法域において FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標・登録商標として認められています。

DICOM は National Electrical Manufacturers Association の登録商標です。

その他の商標はすべて各々の所有者の財産です。

Part Number: **P23659-01**

Publication Date: February 2019

Copyright © 2019 FUJIFILM SonoSite, Inc. All Rights reserved.



DICOM および SiteLink ユーザーガイド

誤記訂正説明書

はじめに	1
表記規則	1
テクニカルサポート	2
検査準備	2
ロケーションの設定 (1 ページ) (DICOM)	2
超音波画像診断装置の設定 (SiteLink)	3

はじめに

表記規則

本書では、下記の表記規則に従っています。

- ・ **警告** は負傷や死亡の事故を防ぐのに必要な注意事項について示します。
- ・ **注意** は製品の保護に必要な注意事項について示します。
- ・ **注**：は補足説明です。
- ・ 特定の順番に実行する必要がある手順は、行頭に番号またはアルファベットで示しています。
- ・ 中点 (・) は情報を簡条書きしたものであり、手順を示すものではありません。
- ・ ◆ の記号は、手順が一つのみであることを示します。

ラベル表示に使用される図記号の説明は、該当するユーザーガイドの「図記号」のセクションを参照してください。

テクニカルサポート

テクニカルサポートが必要な場合は以下へご連絡ください。

FUJIFILM SonoSite, Inc.

電話：(米国およびカナダ) 877-657-8118

電話：(米国またはカナダ以外) +1-425-951-1330

ファックス： 425-951-6700

電子メール： ffss-service@fujifilm.com

ウェブサイト： <http://www.sonosite.com>

富士フイルムメディカル株式会社

電話：(日本国内) 03-6419-8050

ファックス：(日本国内) 03-6418-6596

Printed in the U.S.

検査準備

「SonoSite 超音波画像診断装置を使用した DICOM データの送受信 ユーザーガイド」および「SiteLink ユーザーガイド」内の以下セクションに誤記がありましたので訂正いたします。ユーザーガイドの記載は次回改訂時に訂正いたします。

ロケーションの設定 (1 ページ) (DICOM)

ロケーションの設定 (1 ページ)

Host Name (ホスト名) ネットワーク上の超音波画像診断装置に与えられた独自の装置名。デフォルト設定は「SonoSite」です。

認証サーバのドメイン名。

注： | ワイヤレス接続中にものみ使用可能です。LAN 接続の場合には機能しません。

超音波画像診断装置の設定 (SiteLink)

SiteLink ロケーションの設定

- 1 送信モードが **SiteLink** に設定されていることを確認します。「[送信モードの設定](#)」を参照してください。
- 2 接続性設定ページで、**SiteLink Setup** を選択します。

New を選択し、以下のフィールドに必要な事項を入力します。

Host Name ネットワーク上の超音波画像診断装置に与えられた独自の装置名。
認証サーバのドメイン名。

注： | ワイヤレス接続中にのみ使用可能です。LAN 接続の場合には機能しません。



SonoSite

選任製造販売業者：
富士フイルムメディカル株式会社
〒106-003 東京都港区西麻布 2-26-30
TEL: 03 (6419) 8050

外国指定管理医療機器製造等事業者：
FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)		
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器		
販売名	SonoSite S シリーズ	医療機器認証番号	220ADBZI00071000
	SonoSite Edge シリーズ		224ADBZI00053000
	SonoSite NanoMaxx シリーズ		221ADBZI00091000
	SonoSite M シリーズ		219ADBZI00197000

P23659-01

