

経膈向けプローブ (ICT) ケアガイド


ステップ 1 の 2: プローブを洗浄する

- 警告**
- 必要に応じて、適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
 - 洗浄手順の一部を飛ばしたり、省略しないでください。
- 注意**
- プローブは体液が付着した状態で放置しないでください。必ず使用後直ちにプローブを洗浄してください。

表 1: 経膈向けプローブ (ICT) および超音波画像診断装置の洗浄に適合した洗浄剤・消毒剤

洗浄剤	湿潤接触時間
SaniCloth Plus (赤色の蓋)	3分
SaniCloth AF3 (灰色の蓋)	3分
PI-Spray II	10分

プローブを患者から抜き取ったら直ちに、表 1: 経膈向けプローブ (ICT) および超音波画像診断装置の洗浄に適合した洗浄剤・消毒剤に記載のウェットワイプもしくは消毒液で湿らせた布でプローブをケーブル側からスキャンヘッドに向けて清拭します。目に見える生物由来物質を完全に除去してください。

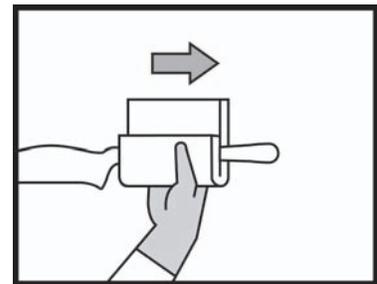

- 注意**
- 承認されていない洗浄剤は使用しないでください。
 - コネクタ部にスプレーをかけたり、溶液に浸漬したりしないでください。

注: 完全に洗浄できたら、ステップ 2 へ進みます。

ステップ 2 の 2: プローブを消毒する

- 警告 S**
- 必要に応じて、適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
 - 消毒手順の一部を飛ばしたり、省略しないでください。
- 注意**
- 承認されていない消毒剤は使用しないでください。
 - コネクタ部を液体に浸漬したりしないでください。
 - プローブは、薬剤製造元が推奨する浸漬時間より長く浸漬しないでください。

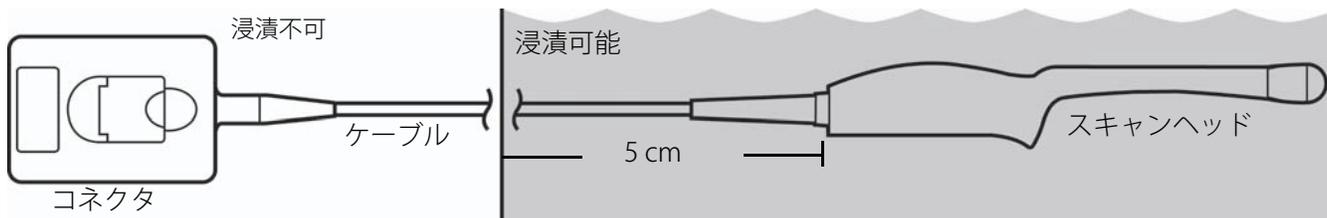


表 2: 承認済みハイレベル消毒剤および浸漬時間

消毒剤	温度	浸漬時間	清水浸漬時間・回数
Cidex	23 °C	45 分	1 分間 × 3 回
Cidex OPA	23 °C	12 分	1 分間 × 3 回

自動化された消毒装置を使用する場合は、製造元が指定する手順に従ってください。消毒の手順は以下のとおりです。


A

消毒作業台にて、

消毒剤の使用期限が切れていないことを確認します。

消毒剤の温度および濃度を確認します。

プローブとケーブルを消毒溶液に浸漬し消毒します。

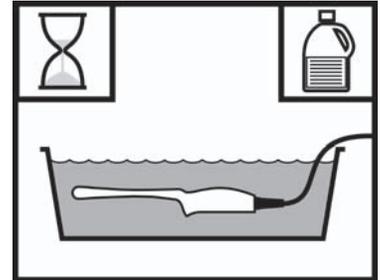


B

最低 2 リットルの大量の滅菌水またはろ過水にプローブを最低 1 分浸漬し洗い流し、これを 3 回繰り返します。

毎回水を入れ替えます。

警告

プローブに化学消毒剤が残留していると、患者が負傷する恐れがあります。

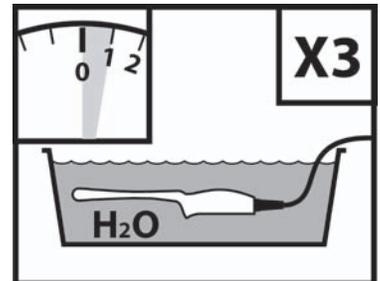


C

プローブおよびケーブルを滅菌リントフリークロスで乾拭きします。貴医療機関の方針に則って、プローブを収納します。

ICT プローブの洗浄・消毒、持ち運びおよび保管に関する詳細は、該当する超音波画像診断装置のユーザーガイドを参照してください。

プローブを点検し、液体が浸入する恐れのある亀裂や裂け目がないことを確認します。

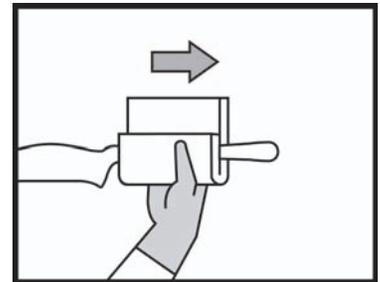

SonoSite および SonoSite ロゴは複数の法域において、FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標または登録商標として認められています。
その他の商標は全て各々の所有者の財産です。

特許 : US 6,371,918, CA 2,373,065, DE 60021552.0, FR 1175173 および GB 1175173.

Copyright © 2017 FUJIFILM SonoSite, Inc. All Rights reserved.

Part Number: P22052-01

Publication Date: January 2017





SonoSite

選任製造販売業者：

富士フイルムメディカル株式会社
〒 106-003 東京都港区西麻布 2-26-30
TEL: 03 (6418) 7190

外国指定管理医療機器製造等事業者：

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)		
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器		
販売名	SonoSite 180 シリーズ用 ICT プローブ ICT/7-4	医療機器認証番号	21600BZG00001000
販売名	SonoSite TiTAN シリーズ用 ICT プローブ ICT/8-5	医療機器認証番号	21600BZG00002000
販売名	SonoSite MicroMaxx シリーズ用 ICT プローブ ICT/8-5	医療機器認証番号	218ADBZI00032000
販売名	SonoSite M シリーズ用 ICT プローブ ICTx/8-5	医療機器認証番号	219ADBZI00197000
販売名	SonoSite NanoMaxx シリーズ用 ICT プローブ ICTn/8-5	医療機器認証番号	221ADBZI00091000
販売名	SonoSiteX-Porte シリーズ用 ICT プローブ ICTxp/8-5	医療機器認証番号	225ADBZI00146000
販売名	SonoSite Edge II シリーズ用 ICT プローブ ICTxi/8-5	医療機器認証番号	229ADBZI00008000

P22052-01

