

SonoSite ミニドックユ ーザーガイド

SONOSITE、M-Turbo、Edge、MicroMaxx、TiTAN、Mシリーズおよび SonoSite ロゴ は 複数の法域において FUJIFILM SonoSite, Inc. の商標または登録商標として認められています。FUJIFILM は FUJIFILM Corporation の登録商標です。「Value from Innovation」は FUJIFILM Holdings America Corporation の商標です。その他の商標はすべて各々の所有者の財産です。

特許: www.sonosite.com/patents



P05357-10

Published Sep 30, 2022

Copyright © 2022 FUJIFILM SonoSite, Inc. All rights reserved.

SonoSite ミニドックユーザーガイド

はじめに	1
表記規則	1
テクニカルサポート	1
ミニドックの着脱	2
ミニドックのコネクタ	3
洗浄および消毒	4

はじめに

ミニドックはアクセサリおよび周辺機器などのさまざまな接続を可能にするコネクタを提供します。下記の超音波画像診断装置に接続できます。

- 超音波画像診断装置 SonoSite Edge II シリーズ
- 超音波画像診断装置 SonoSite Edge シリーズ
- 超音波画像診断装置 SonoSite M シリーズ
- 超音波画像診断装置 SonoSite MicroMaxx シリーズ
- 超音波画像診断装置 SonoSite TiTAN シリーズ



注記

ミニドックは各機種専用となっています。

表記規則

本書では、下記の表記規則に従っています。

- **警告** は負傷や死亡の事故を防ぐために必要な注意事項について示します。
- **注意** は製品の保護するために必要な注意事項について示します。
- **注** は補足説明です。
- 特定の順番に実行する必要がある手順は、行頭に番号またはアルファベットで示しています。
- 中点 (・) は情報を箇条書きしたものであり、手順を示すものではありません。

記号の定義および用語解説は該当する超音波画像診断装置のユーザーガイド内に記載されています。

テクニカルサポート

- FUJIFILM SonoSite テクニカルサポート

電話：(米国およびカナダ) +1 877-657-8118

電話：(米国またはカナダ以外) +1-425-951-1330

ファックス： +1 425-951-6700

電子メール： (アジア地域)	
ウェブサイト：	www.sonosite.com
富士フイルムメディカル株式会社	
電話：(日本国内)	03-6419-8050
ファックス：(日本国内)	03-6418-6596

Printed in the U.S.

ミニドックの着脱



警告

患者の感電を防止するため、ミニドック背面に装備されている非接地のコネクタと患者に同時に触れないでください。



注意

- ミニドックの破損を防止するために、ミニドックを含む高電流接地インピーダンス試験は行わないでください。接触が可能なミニドックの金属部分は、保護接地されていません。
- 装置の破損を防止するため、超音波画像診断装置を持ち運ぶ際は、ミニドックを取り外してください。


1. 超音波画像診断装置の電源がオフになっていることを確認してください。
電源がオンになっている状態でミニドックを超音波画像診断装置に接続すると、ミニドックが正常に機能しないことがあります。
2. ミニドックの突起部分（足）を本体の下に差し込み、超音波画像診断装置の背面にしっかりと押し付けて、本体との間に隙間がないように装着します。



注記

接続性を失った場合には、超音波画像診断装置の電源をオフにし、ミニドックをしっかりと接続し直してください。プローブを交換する際に、ミニドックが緩むことがあります。プローブを交換した後は、必ずミニドックがしっかりと装着されていることを確認してください。

3. ミニドックを取り外すには、超音波画像診断装置のハンドルを握りリリースレバーを後方に押し、装置本体を手前に引き抜きます。

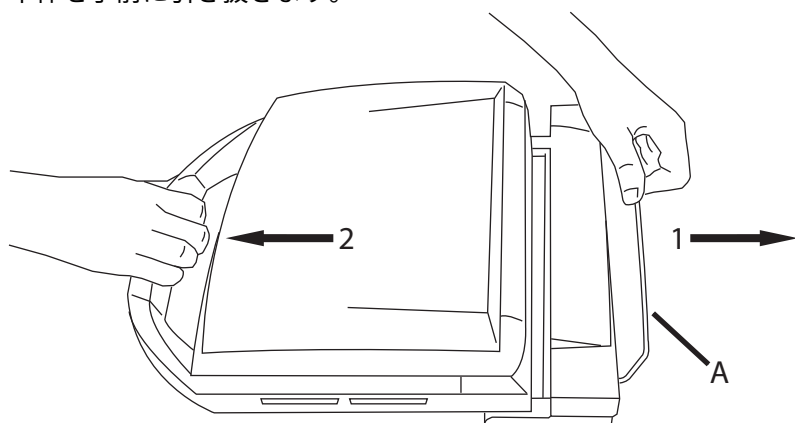

A. リリースレバー

ミニドックのコネクタ

ミニドックのコネクタにはその用途を示す図記号が表示されています。装備されているコネクタの種類は、お手元のミニドックのバージョンにより異なります。

表 1 ミニドックに表示の接続性に関する図記号（プリンタとの互換性があるバージョン）

記号	機能	記号	機能
	DC 入力		S- ビデオ信号入力
	プリンタ制御		DVI ビデオ信号出力
	USB		コンポジットビデオ信号出力
	イーサネット		オーディオ 信号出力
	RS-232C (DVD レコーダ、VCR、またはバーコードリーダー)		ECG またはフットスイッチ
	S- ビデオ信号出力		

表 2 ミニドックに表示の接続性に関する図記号（プリンタとの互換性がないバージョン）

記号	機能	記号	機能
	DC 入力		S- ビデオ信号入力
	USB		DVI ビデオ信号出力
	イーサネット		オーディオ 信号出力
	RS-232 (バーコードリーダー)		ECG またはフットスイッチ

洗浄および消毒



注意

承認された洗浄剤または消毒剤のみを外表面に使用してください。

浸漬用消毒剤の外表面への使用は承認されていません。 www.sonosite.com/support/cleaners-disinfectants にて「Cleaners and Disinfectants Tool」を参照してください。承認された洗浄剤・消毒剤のリストを掲載しています。

ミニドックの外表面は、推奨する洗浄剤または消毒剤で洗浄および消毒することができます。洗浄・消毒の手順に関しては、超音波診断装置のユーザーガイドを参照してください。ユーザーガイドはウェブページから入手できます。 www.sonosite.com/support/user-documents

FUJIFILM

SONOSITE

選任製造販売業者:

富士フイルムメディカル株式会社

〒 106-003 東京都港区西麻布 2-26-30

TEL: 03 (6419) 8050

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:

FUJIFILM SonoSite, Inc. (米国)

一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	販売名
229ADBZI00008000	Edge II シリーズ
224ADBZI00053000	Edge シリーズ
219ADBZI00197000	M シリーズ
218ADBZI00032000	MicroMaxx シリーズ
21600BZG00002000	TiTAN シリーズ

P05357-10

